

Bedienungsanleitung Krankentrage N

Wichtige Hinweise: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Um Bedienungsfehler zu vermeiden, bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Zweckbestimmung des Produkts: Die Krankentragen dienen zum Transport von Kranken und Verletzten, vor allem in den Bereichen Industrie, Baustellen, Sanitätsdienst, Katastrophenschutz etc.

Hinweise zur Sicherheit: Die Krankentrage sollte nur von geschultem Personal eingesetzt werden. Der Umgang mit diesem Medizinprodukt ist Bestandteil der Ausbildung bei den Hilfsorganisationen.

- Die Krankentrage darf nicht für andere Zwecke (z.B. allgemeine Sachtransporte) verwendet werden.
- Krankentrage darf erst nach dem Schließen der Patientengurte hochgehoben werden.

Achtung! Nicht auf die offenen Patientengurte treten!

Handhabung: Aus Gründen der Platzeinsparung sind die Krankentragen in Länge bzw. in Länge und Breite zusammenklappbar.

- Beim Ein- und Ausklappen der Krankentrage achten Sie darauf, dass das Material nicht zwischen den Metallteilen (Gelenken) eingeklemmt wird.
- Beim Ausklappen ist darauf zu achten, dass die Sicherungsstifte an den Gelenken vollständig einrasten.

Achtung! Die Finger nicht in den Gelenken einklemmen!

Die Krankentrage darf nur verwendet werden, wenn die Bespannung der Liegefäche stramm ist.

Reinigung: Reinigen Sie die Krankentrage nach dem Einsatz mit Wasser oder handelsüblichen Putzmitteln und desinfizieren Sie die Krankentrage anschließend. Hierfür dürfen nur BGA-zugelassene Mittel zum Einsatz kommen.

Äther, Heizöl, Diesel, Benzin und Motoröl können das Gewebe und die Beschichtung beschädigen.

Wartung: Um im Einsatz die Sicherheit des Verletzten und des Benutzers zu gewährleisten, empfehlen wir, die Krankentrage einer jährlichen Sichtprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

Sollten Beschädigungen oder ein Verdacht auf Beschädigungen auftreten, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb, bis die aufgetretenen Unregelmäßigkeiten behoben sind.

Reparatur: Eine evtl. anfallende Reparatur darf nur vom Hersteller ausgeführt werden und es dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.

Garantie: Die Garantie beginnt mit der Übernahme durch den Empfänger. Sie umfasst Schäden infolge Herstellungs- und Materialschäden, nicht jedoch wegen unsachgemäßer Benutzung.